

Lista de verificação do DAE

No sector marítimo, um DEA em funcionamento é vital. Quer trabalhe num navio, numa plataforma offshore ou num porto, uma RCP rápida e eficaz pode fazer toda a diferença. É por isso que a manutenção e as verificações regulares do seu DEA são cruciais.

Segue-se uma lista de verificação útil para o ajudar a manter o seu DAE operacional e pronto a ser utilizado.



Prazo de validade dos eléctodos

A data de validade dos eléctodos pode ser encontrada na embalagem. Os eléctodos antigos podem não funcionar tão bem devido ao gel que seca com o tempo. Por isso, é fundamental que os eléctodos estejam em boas condições!

Embalagem dos eléctodos

A embalagem dos eléctodos não está danificada? Uma embalagem aberta ou danificada pode provocar a secagem do gel condutor, reduzindo a eficácia dos eléctodos.



Indicador de estado

Indicador positivo - frequentemente uma luz verde (intermitente): Todos os sistemas estão a funcionar! O DAE está pronto para entrar em ação.

Indicador negativo - frequentemente uma luz vermelha (intermitente), por vezes com sinais sonoros: Existe um problema, verifique imediatamente o que está errado e consulte o manual.



Kit de resgate completo

Existe um kit de RCP completo com o seu DAE? Este kit contém tudo o que é necessário para a reanimação, como tesouras, lâminas de barbear, material desinfetante, máscara respiratória e luvas.

[Ver o kit de RCP aqui](#)

Ainda tem dúvidas?

Tem perguntas sobre o desfibrilhador ou a sua devida manutenção? Não tem a certeza sobre o estado do seu DAE? Ou gostaria simplesmente de fazer uma pergunta ou pedir conselhos? A Medisol terá todo o gosto em ajudá-lo!

[Ver opções de contacto](#)